

ZALECENIE

POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBKI KAŁU DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO W KIERUNKU CAMPYLOBACTER

I. Kał

1. Świeży kał po oddaniu do czystego, uprzednio wyparzonego wrzątkiem i wysuszonego naczynia (basen, nocnik) lub naczynia jednorazowego użycia (talerz) pobrać przy pomocy łopatkii umieszczonej w jałowym pojemniku.

Uwaga: Pobierać kał z miejsc zmienionych chorobowo, z widoczną krwią i śluzem!

2. Wypełnić pojemnik kałem w ilości 1/3 wysokości pojemnika.
3. Pojemnik dokładnie zamknąć
4. Na pojemniku umieścić dane pacjenta (imię, nazwisko).
5. Pojemnik umieścić w foliowym woreczku.
6. Wypuścić powietrze z woreczka i zawiązać go na węzeł.
7. Do każdej próbki dołączyć „Zlecenie na badanie materiału biologicznego” (F-09/IS-LMK-02) umieszczone oddzielnie w kopercie lub torebce nie mającej kontaktu z próbką przeznaczoną do badania.
8. „Zlecenie...” wypełnić czytelnie i dokładnie.
9. Pobraną próbkę dostarczyć niezwłocznie do laboratorium (tzn. do 2 godzin od pobrania).
Próbkę transportować w temperaturze pokojowej.

Uwaga: Jeśli dostarczenie próbki w czasie do 2 godzin od pobrania jest to niemożliwe, pobrać wymaz z kału!

II. Wymaz z kału

W przypadku braku podłoża transportowego z węglem aktywnym, podłoże można pobrać w Oddziale Laboratoryjnym Mikrobiologii Klinicznej WSSE w Krakowie.

1. Wymazówkę zanurzyć w oddanym kale (łącznie ze śluzem, krwią jeśli są obecne) i umieścić w probówce z podłożem transportowym.
2. Dostarczyć do 24 godzin od pobrania. W tym czasie wymazówkę przechowywać w temperaturze $2\div 8^{\circ}\text{C}$.
3. Do każdej próbki dołączyć „Zlecenie na badanie materiału biologicznego” (F-09/IS-LMK-02) umieszczone oddzielnie w kopercie lub torebce nie mającej kontaktu z próbką przeznaczoną do badania.
4. „Zlecenie...” wypełnić czytelnie i dokładnie.

Uwaga: Próbkę pobiera się jak najszybciej po wystąpieniu objawów chorobowych (biegunka), możliwie przed podjęciem leczenia przeciwbakteryjnego!

Pojemnik z próbką do badania transportować w pozycji pionowej, ostrożnie, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie (zgniecenie, pęknięcie pojemnika).

**Zlecenie zniszczone (pomięte , poplamione) nie będzie przyjęte.
Nie wkładać zlecenia do woreczka z próbką kału !**